

Suma Med Super LpH

Detergente líquido para lavagem em águas macias e de dureza média

Descrição

Suma Med Super LpH é um detergente líquido concentrado de lavagem e enxaguamento especialmente formulado para uma excelente remoção da sujidade em instrumentos cirúrgicos, em águas macias e de média dureza.

Propriedades

Suma Med Super LpH é um detergente líquido alcalino indicado para utilização numa vasta gama de máquinas de lavagem e desinfecção de instrumentos. O produto está especialmente formulado para a lavagem de instrumentos cirúrgicos, materiais de anestesia e frascos de aspiração em máquinas de lavagem e desinfecção. Também é excelente para a lavagem, em máquinas de enxaguamento e desinfecção, de tinas de lavagem, tabuleiros riniformes e outros tabuleiros portáteis. O produto pode também ser utilizado em máquinas de lavar louça. Contém uma mistura de alcalinos e agentes sequestrantes de cálcio, que proporcionam uma excelente remoção da sujidade e acção anti-calcário em águas macias e de dureza média.

Benefícios

Remove eficazmente a sujidade e sangue ressequidos
Produto de elevada concentração proporciona grande economia na utilização
Evita incrustações de calcário na máquina
Embalagens pequenas, fáceis de manusear

Instruções de utilização

Suma Med Super LpH aplica-se normalmente através de doseadores automáticos a uma concentração de 1 – 3 ml/l.
Inserir o tubo de sucção na embalagem de detergente e o doseamento será feito correctamente.
Os níveis de dosagem são determinados pelas condições de funcionamento locais.

Dados técnicos


Aspecto	Líquido transparente
pH (solução a 1%)	10.0
Densidade relativa (20 °C)	1.18

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação do produto é fornecido em separado na Ficha de Segurança.
Armazenar nas embalagens originais. Evitar temperaturas extremas.

Compatibilidade do produto

Quando usado de acordo com as condições recomendadas, o **Suma Med Super LpH** é indicado para aplicação na grande maioria dos materiais encontrados em hospitais. Não aplicar em utensílios sensíveis a alcalinos, tais como, cobre, latão, alumínio ou borracha.

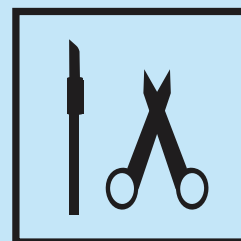

Suma Med Super LpH

Sede Diversey em Portugal:

Avenida Doutor Luís Sá, nº 6,8,.10
Zona Industrial da Abrunheira
2714-505 Sintra
Tel. 21 915 7100