

Suma Med Rinse Plus

Secante ácido produto de remolha para a limpeza de instrumentos cirúrgicos

Descrição

Suma Med Rinse Plus é um aditivo que combina a acção de secante e desincrustante para a limpeza de instrumentos cirúrgicos.

Propriedades

Suma Med Rinse Plus é um secante ácido e desincrustante para a limpeza de instrumentos cirúrgicos. Foi especialmente formulado para utilização numa vasta gama de máquinas de lavar e desinfectar. O produto contém uma mistura especial de tensoactivos não-iónicos e ácido, para uma secagem mais rápida e livre de manchas em todas as superfícies e durezas de água. O produto tem também um excelente produto de remolha para sangue, ferrugem e outras sujidades e manchas. Contém agentes anti-espuma e é muito eficaz na prevenção da formação de calcário.

Benefícios

Fórmula única com acção combinada de secagem e desincrustação
Garante uma secagem rápida
Resultados de secagem rápida e sem manchas
Baixa espuma para um funcionamento mais eficiente
Remove com eficácia sujidade e sangue ressequidos
Fórmula altamente concentrada para um excelente controlo de custos

Instruções de utilização

Suma Med Rinse Plus (Secante) é habitualmente doseado manualmente no recipiente adequado da máquina de lavar a uma concentração de 0.2-0.4 ml/l. (Remolha) dosear 1-2 litros de **Suma Med Rinse Plus** para 10 litros de água morna (temperaturas de 40-60 °C). Deixar o material imerso durante 10 minutos. Enxaguar em seguida.
Os níveis de dosagem são determinados pelas condições de funcionamento locais.


Dados técnicos

Aspecto	Líquido transparente
pH puro	2.0
Densidade relativa (20 °C)	1.07

Estes valores são típicos e não devem ser considerados como uma especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação do produto é fornecido em separado na Ficha de Segurança.
Armazenar nas embalagens originais. Evitar temperaturas extremas.

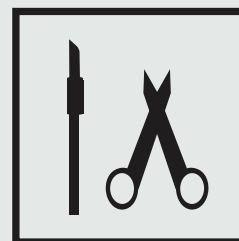

Suma Med Rinse Plus

Compatibilidade do produto

Quando usado de acordo com as condições recomendadas, o **Suma Med Rinse Plus** é indicado para aplicação na maioria dos materiais habitualmente encontrados em hospitais. Não aplicar o produto concentrado em cobre, alumínio ou latão. Não aplicar o produto antes de lavar o tanque; evitar a utilização de bocais de cobre. Usar tubagens de aço inox para dosear o produto.

Sede Diversey em Portugal:

Avenida Doutor Luís Sá, nº 6,8,.10
Zona Industrial da Abrunheira
2714-505 Sintra
Tel. 21 915 7100