

Oxivir® Excel™ Foam CE

Detergente desinfetante de largo espectro indicado para dispositivos médicos não invasivos e superfícies duras não porosas

Descrição

Diversey Care Oxivir Excel Foam é um detergente desinfetante pronto a usar, com eficácia de largo espectro. Limpa e desinfeta num único passo, com um tempo de contacto extremamente reduzido. Com uma formulação à base de peróxido de hidrogénio acelerado (AHP), patenteado pela Diversey Care, Oxivir Excel Foam pode ser usado em superfícies duras não porosas e em algum mobiliário.

Propriedades

- Bactericida, Virucida, Leveduricida
- Desinfeta em menos de um minuto
- Seguro para os utilizadores e para as superfícies
- Prático, não necessita de preparação
- Poder de limpeza efetivo
- Sem perfume
- Os agentes ativos dão origem a água e oxigénio
- Não necessita de enxaguamento

Benefícios

- Ampla eficácia, proporcionando elevados níveis de proteção dos pacientes. Extensivamente testado de acordo com diversas normas Europeias e eficaz contra diferentes tipos de agentes patogénicos. Tem eficácia virucida, incluindo Poliovirus, Adenovirus, e Murine norovirus, sendo considerado eficaz em todo o tipo de vírus encapsulados, tais como: HIV, HBV, HCV, Influenza, Vaccinia virus e Coronavirus.
- Tempos de contacto reduzidos, asseguram uma desinfecção eficaz
- Excelente poder de limpeza, incluindo descalcificação, dispensando assim a necessidade de limpeza prévia
- Seguro para os utilizadores, reduzindo risco de acidentes de trabalho. Quando diluído, não tem advertências de perigo, nem é irritante para as vias respiratórias
- Fórmula à base de AHP, não danifica as superfícies, aumentando o tempo de vida dos equipamentos
- Adequado para usar em zonas de alto risco, como áreas hospitalares, incluindo BO, UCI, UCIN e enfermarias

Instruções de utilização

Aplicação

Espuma de limpeza e desinfecção:

1. Remover a sujidade difícil.
2. Aplicar pulverizando o pano ou diretamente na superfície, usando uma garrafa pulverizadora.
3. Após o tempo de contacto*, deixar secar ao ar, ou secar com a ajuda de um pano ou papel.



Dry Wipes Dispensador de Toalhetes Descartáveis

1. Preparar o sistema Dry Wipes Dispensador de Toalhetes Descartáveis, de acordo com as instruções.
2. Remover a sujidade difícil.
3. Retirar apenas um toalhete e limpar a superfície.
4. Após o tempo de contacto*, deixar secar ao ar, ou secar com a ajuda de um pano ou papel.
5. Substituir o toalhete quando estiver visivelmente sujo ou sempre que mudar para outra área a limpar.

Importante: Não usar água quente. Não misturar com outros produtos químicos. Não usar em superfícies sensíveis à água e a ácidos.

* Garantir que a superfície se mantém molhada durante o tempo de contacto.

CE
0088

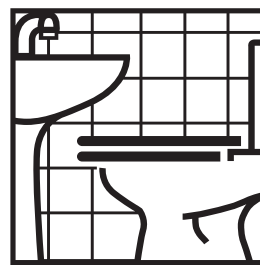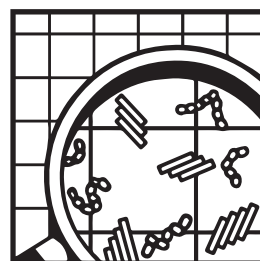

© A.I.S.E.

Oxivir[®] Excel[™] Foam CE

Detergente desinfetante de largo espectro indicado para dispositivos médicos não invasivos e superfícies duras não porosas

Dados Técnicos

Aspeto	Líquido incolor
Densidade relativa (20 °C)	1,000
pH (em uso)	1,95
Ponto de inflamação	N/A
Validade	720 dias
Fragrância	neutra

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – <https://sds.sealedair.com/>

Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas. Reage com substâncias oxidáveis.

Compatibilidade do produto

Segundo as recomendações de utilização, Diversey Oxivir Excel CE é adequado para uso na maioria dos materiais normalmente encontrados.

Informação ecológica

Os tensoativos usados neste produto são biodegradáveis de acordo com os requisitos estabelecidos pelo Regulamento EC 648/2004, relativo aos detergentes.

Dados microbiológicos

Eficácia comprovada de acordo com as normas europeias EN: EN1276, EN1650, EN13727, EN13624 e EN14476.

Atividade de desinfecção		Tempo de contacto
<i>Bactericida</i>	pronto a usar	5 min
<i>Leveduricida</i>	pronto a usar	5 min
<i>Virucida</i>	pronto a usar	30 sec